

Paso 1

Solicitar al examinado una muestra de saliva, verificando que no tenga en su boca, chicle, pastilla, dulce o alimento alguno.
Humectar el aplicador por aproximadamente 1 minuto por debajo de la lengua, sin morderlo.
El aplicador, tiene un sabor cítrico que nos ayuda a promover la salivación, debemos indicarlo al paciente.



Paso 2

Verificar el color en la pipeta del aplicador, debe mostrar un color rosado.
En caso de no presentarlo después de 5 minutos de humectación, continuar con el paso 3



Paso 3

Remueva el aplicador de la boca del examinado para insertarlo en el reactivo MD Saliva Drug Test.
Enrosque la tapa hasta sentir un tope y espera 2 minutos para que se humecten las tiras reactivas que están en la parte frontal del vaso.



Paso 4

Interprete los resultados como se muestra en la tabla inferior después de 5 minutos



INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

NEGATIVO
Dos líneas se muestran en cada panel de drogas.

NEGATIVO
La línea en la celda "T" se muestra tenue.

POSITIVO
La línea en la celda "T" No aparece.

INVALIDA
La línea en la celda "C" y "T" No aparecen.